



## GEBRAUCHSANWEISUNG

# MediBoard

Die PC-Tastatur für die Medizintechnik



### MediBoard mit Mousepad

<b>REF</b>	H+K Nr. 67802xxx	(L 410 x B 220 x H 26 mm)
------------	------------------	---------------------------



### MediBoard mit Zahlenblock

<b>REF</b>	H+K Nr. 67801xxx	(L 410 x B 220 x H 26 mm)
------------	------------------	---------------------------

Das MediBoard weist die normalen Eigenschaften einer Computertastatur auf, ist jedoch besonders für den Klinikbetrieb- und Betrieb in Arztpraxen ausgelegt. Die geschlossene Oberfläche ist geeignet zur mehrmaligen täglichen Desinfektion mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln und hat eine antimikrobielle Folienoberfläche, die die Ausbreitung verschiedener Viren und Bakterien verhindert. Das Board lässt sich durch einen USB-Anschluß mit anderen Geräten verbinden.

#### ZWECKBESTIMMUNG

Cleanboard und MiniCleanboard stellen Zubehör für Geräte mit USB Anschluss (bsp. PC) dar und können nur mit solchen kombiniert werden.

#### REINIGUNG

- Wir empfehlen für die Reinigung milde Reinigungsmittel oder Seifenlauge. Mit weichem Tuch trocknen.
- Für die Desinfektion sollten Flächendesinfektionsmittel verwendet werden, die üblicherweise vor der Anwendung aus Konzentraten und Wasser hergestellt werden. Eine Liste mit getesteten Desinfektionsmitteln findet sich im Downloadbereich auf [www.keywi.de](http://www.keywi.de).

	Produkte dürfen nicht thermisch desinfiziert werden.
	Schleifend wirkende Reinigungshilfsmittel und alkoholhaltige Reinigungsmittel sind nicht gestattet.
	0° C bis +50° C
	2012
	Hoffmann + Krippner GmbH, Siemensstraße 1, 74722 Buchen

Die Empfehlungen und Hinweise zur Reinigung unserer Produkte beruhen auf internen und externen Untersuchungen. Bei unsachgemäßer Anwendung und Handhabung schließen wir eine Haftung aus.

#### INDIKATION

Geeignet für hohe Sicherheitsanforderung an die Hygiene und Sauberkeit der Umgebung in Risikobereichen mit möglichem und mit besonderem Infektionsrisiko (siehe Infektionsprevention der Kommission für Krankenhaushygiene des Robert Koch Institut).

#### KONTRAINDIKATION

Nicht geeignet zum Anschluss an Medizinprodukte ab Risikoklasse IIa.

#### RÜCKNAHME

Die Rücknahme der Produkte kann nur erfolgen, wenn diese als „klinisch unbedenklich“ deklariert sind.

#### SYMBOLS UND KENNZEICHNUNGEN

<b>SN</b>	Seriennummer
<b>REF</b>	Artikelnummer
	Hersteller
	Achtung, Warnhinweis, Vorsichtsmaßnahme
	Hersteldatum
	Temperaturbeständigkeit
	Gebrauchsanweisung beachten

